

センシン

血沈測定



システム

- WESTERGEREN (ウェスターグレン) 法に準じた測定システムです
- 血沈棒にはストッパーがついておりますので安易に0点に合わせることができます
- ディスプレイ商品ですので安全にご使用できます

ディスプレイ血沈棒

一般医療機器 (クラスⅠ)
 品番: 1030
 品名: ポリスベットG-S
 JANコード: 4582251011289
 医療機器製造販売届出番号: 20B3X00010000041
 1箱 (100本入り)
 価格 (税抜) ¥5,000-



0地点ストッパー付き



先端テーパ付き

専用スタンド

品番: 1013
 品名: 血沈DLスタンド
 JANコード: 4562127610013
 1台
 価格 (税抜) ¥12,000-



ポリスベットG-Sを10本立てられます

品番: 1016
 品名: スタンド用ダブルストッパー
 JANコード: 456127610105
 1袋 (10個入り)
 価格 (税抜) ¥850




品番: 1031
 品名: E-Sチューブ
 JANコード: 4562127610136
 1箱 (500本入り)
 価格 (税抜) ¥10,000



品番: 1032
 品名: CT-Sチューブ
 JANコード: 4562127610143
 1箱 (500本入り)
 価格 (税抜) ¥12,000




血沈専用真空採血管用

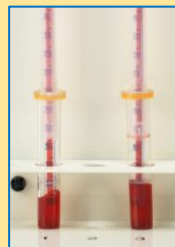


品番: 1015
 品名: 吸引用バネアダプター
 JANコード: 4562127610099
 1セット (5本入り)
 価格 (税抜) ¥2,500



陰圧により片手で血液を移動できます

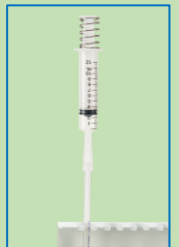

◆E-Sチューブの使い方

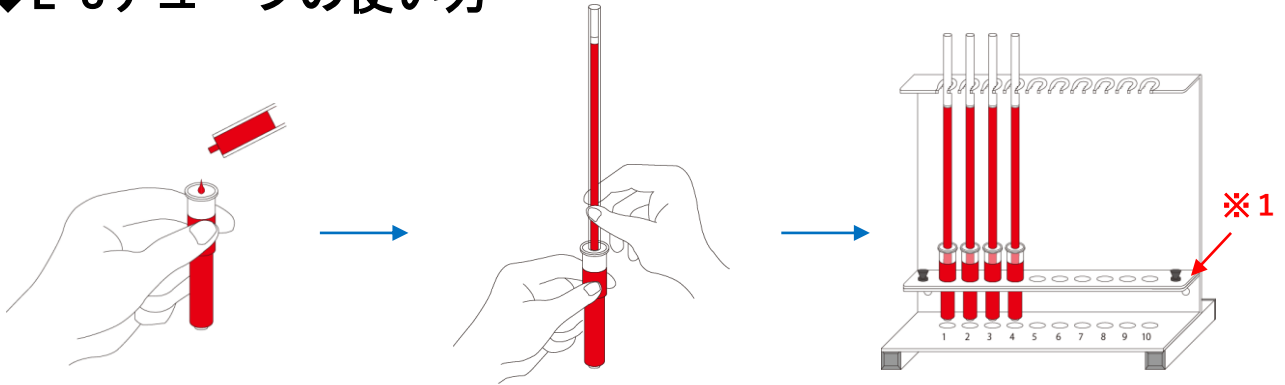


①注射針を取り、血液をE-Sチューブに移し目安線（上部より約4mm）まで入れます。

注意：E-Sチューブには血液凝固剤は入っておりません。

②ポリスペットG-SをE-Sチューブにゆっくり差し込み、0点ストッパーに血液が付着するまでゆっくり押し込んでください。

③そのままアタッチメント（※1）を前に置いたDLスタンドに立てポリスペットG-Sの上部をダブルストッパーに固定します。これでセット完了です。

◆CT-Sチューブの使い方

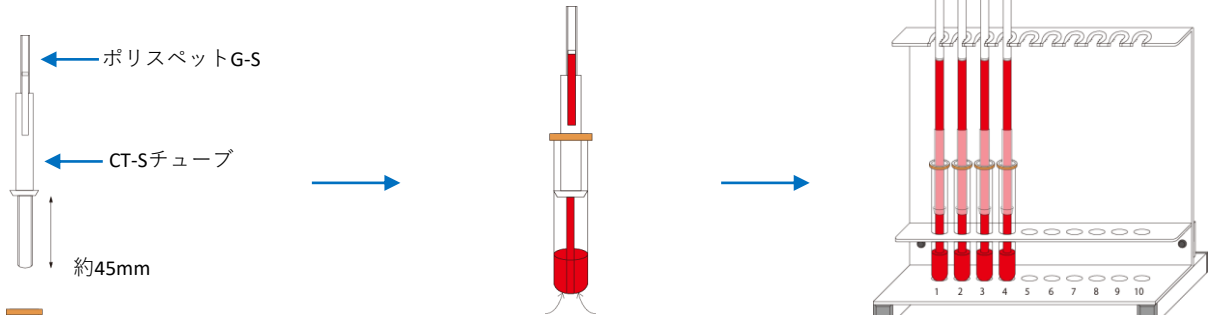


①予めポリスペットG-SをCT-Sチューブに差し込み先端を約45mm出しておきます。

②採血した真空採血管のゴムキャップを取りポリスペットG-Sを先端から差し込むと血液が上がりますので0点ストッパーに血液が付着するまでゆっくり押し込んでください。

③真空採血管ごとDLスタンドに立てポリスペットG-Sの上部をダブルストッパーに固定して準備完了です。（アタッチメントの移動は不要です）

◆バネアダプターの使い方

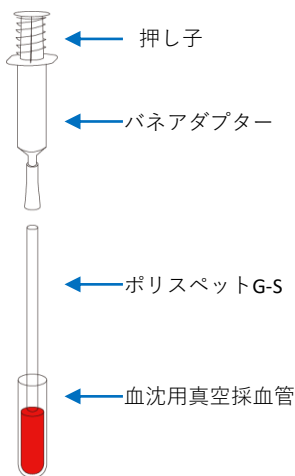

①血液が入った真空採血管にポリスペットG-Sを差し込みDLスタンドに立てます。

②バネアダプター押し子を押しながらバネアダプター先端を強めにポリスペットG-S上部にセットし押し子をゆっくり離してください。（その時ポリスペットG-Sを若干真空採血管から離すとスムーズに血液が移動します）ポリスペットG-S 0点ストッパーに血液が付着しましたら準備完了です。

**三種類の血液移管方法をご提案致します。
簡単、スピーディーに
検査が安易に行えます。**

