

ClipAid

クリップエイド総合カタログ



ClipAid series

クリップエイド φ3/φ5




クリップエイド φ3



クリップエイド φ5

- チューブの引っ張りから気切孔を守ります。
- 衣服に穴を開けることなくしっかりとチューブをクリップできます。
- クリップが回転するので、チューブの動きを妨げません。
- Baby02の落下防止にも役立ちます。

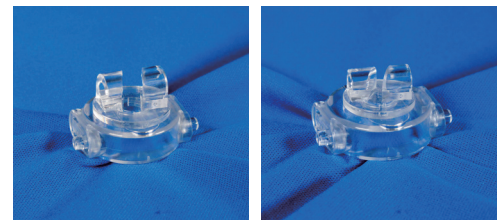

φ3mm


φ5mm

| JANコード(13) | 販売名 | 規格/型式 | 包装(数量) |
|---------------|------------------|-------------|--------|
| 4562127610860 | クリップエイド 03 CA-03 | チューブ径: φ3mm | 3個/箱 |
| 4562127610815 | クリップエイド 05 CA-05 | チューブ径: φ5mm | |

クリップエイド 蛇管用



- 衣服に穴を開けることなくしっかりと蛇管をクリップできます。
- 付属のシールでクリップエイドが見えやすくなります。
- クリップが回転するので、蛇管の動きを妨げません。

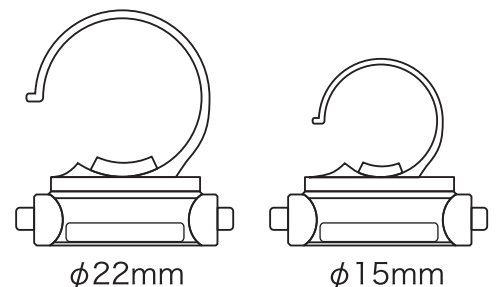


φ22mm

φ15mm

| JANコード(13) | 販売名 | 規格/型式 | 包装(数量) |
|---------------|------------------|--------------|--------|
| 4562127610839 | クリップエイド 15 CA-15 | チューブ径: φ15mm | 3個/箱 |
| 4562127610846 | クリップエイド 22 CA-22 | チューブ径: φ22mm | |

クリップエイドシリーズ

クリップエイド Fb20

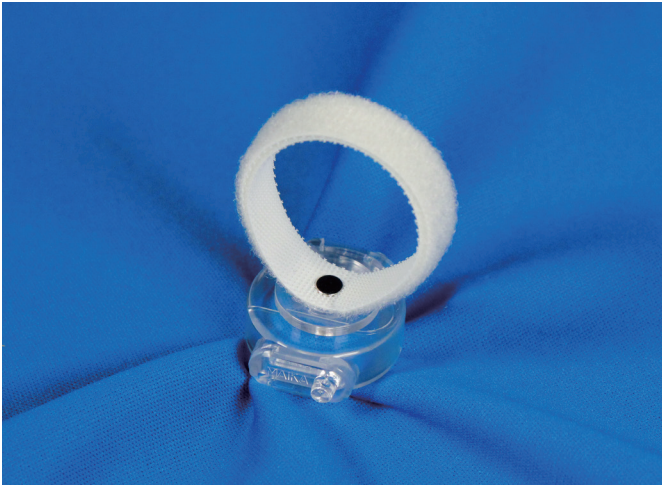


- 衣服に穴を開けることなくしっかりと蛇管等をクリップできます。
- チューブ等をまとめてクリップできます。

| JANコード(13) | 販売名 | 包装(数量) |
|---------------|---------------------------|--------|
| 4544753045117 | クリップエイド Fb20 ClipAid Fb20 | 3個/箱 |

ベビークリップ



- ソフィットベント Baby02専用の外れ防止クリップです。

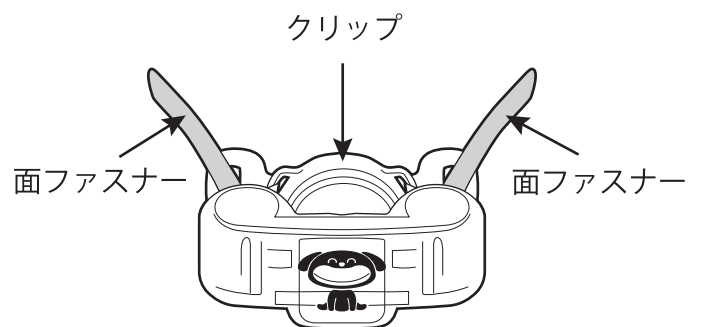

ソフィットベント Baby02


| JANコード(13) | 販売名 | 規格/型式 | 包装(数量) |
|---------------|------------------|----------------------|--------|
| 4544753031028 | ベビークリップ BabyClip | 商品構成:クリップ1個、面ファスナー2本 | 1個/袋 |

製品情報、購入に関してはこちらから




使用方法:クリップエイド


注意 ●小さなお子様にご使用になる場合は、誤嚥防止のため固定ボタンを縫い付けてご使用ください。

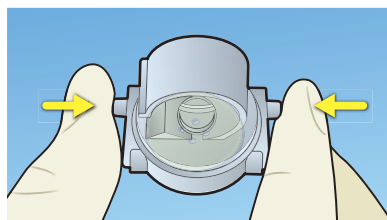


①左右の突起を押してホルダーを開きます。

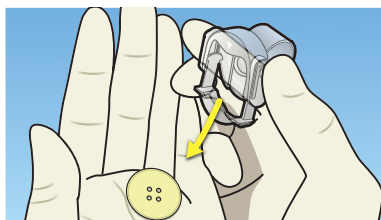


②ボタンを取り出します。

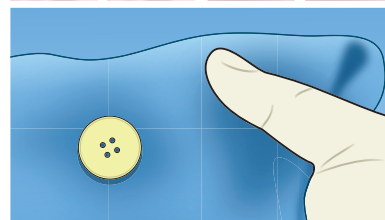


③布地の裏にボタンをあてます。

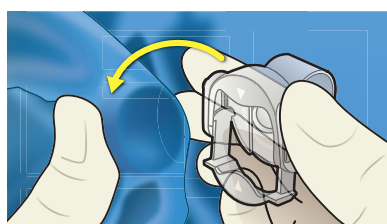


④布地の上からホルダーを被せます。

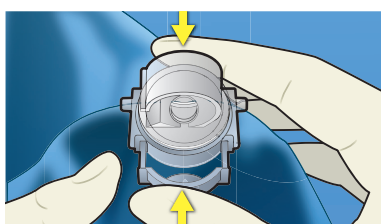


⑤ホルダーのスライダーを強く押します。

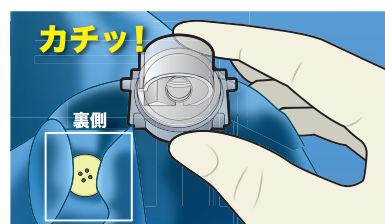


⑥「カチッ」とロックするまで押し込みます。

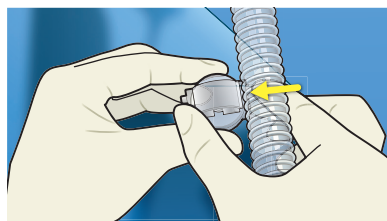

⑦蛇管をクリップに差し込みます。

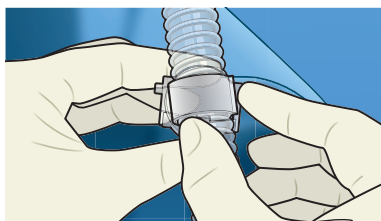


⑧完全にはめ込みます。

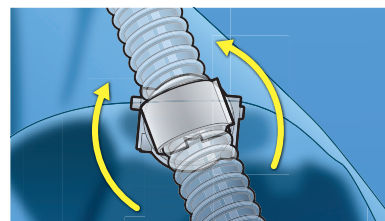


⑨セット完了。


使用方法:ベビークリップ

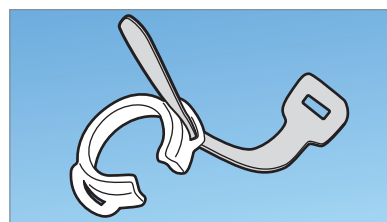


①クリップに面ファスナーを取り付けます。(2箇所)

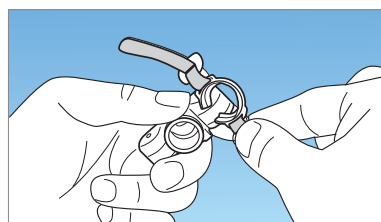


②面ファスナーのザラザラ面を上向きにして、クリップ付け根のファスナーをしっかり持ちます。

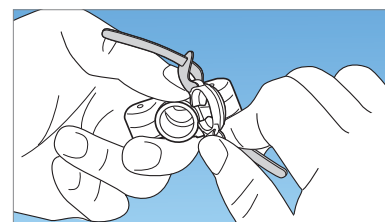


③クリップの切れ目を15mm コネクタの縁に当てます。

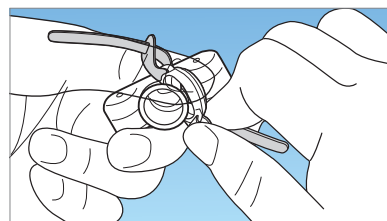

④クリップがコネクタを挟み込むように嵌め込みます。

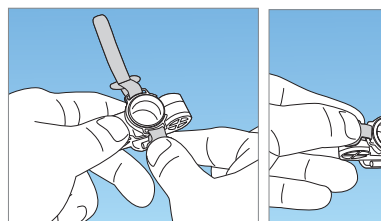

⑤クリップの角度を調整します。

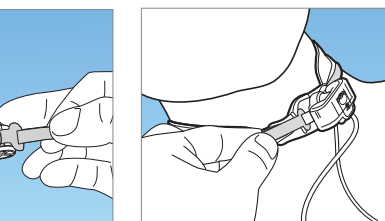

⑥クリップの面ファスナーをネックバンドに貼り付けます。

販売業者

センシンメディカル株式会社
SENSHIN

■東京都文京区本郷3-40-3 ■お問い合わせ先:センシンメディカル株式会社 TEL 03-5802-0560

■カタログの内容は予告無く変更する場合がありますのでご了承願います。 ■カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合があります。

●2024/8月