


# ニューボイス

MADE IN U.S.A.(アメリカ ニューボイス社製)

かるくて

じょうぶ

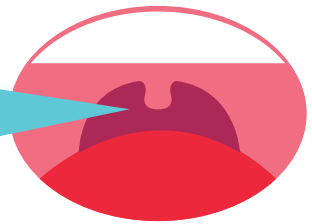

商品コードA302001

## ニューボイスⅠ

### シンプル設計

直径34mm 長さ107mm 重量90g(電池除く)



発声ボタン

音量調整ダイヤル

トーン調整ダイヤル  
(付属ドライバー付)

### 選ぶポイント

指で音量調整  
できるので  
頻繁に音量調整  
したい方

- 1 喉頭全摘出術を受けた方
- 2 気管切開術を受けた方
- 3 何らかの理由で発声が困難な方

商品コードA302000

## ニューボイスⅡ

### 簡単操作

### ベストセラー

直径34mm 長さ112mm 重量87g(電池除く)



発声ボタン

音量調整ボタン

トーン調整ボタン

### 選ぶポイント

あまり音量  
トーンを  
変えない方

商品コードA302003

## ニューボイスⅢ

### 音量選べる2ボタン

直径34mm 長さ120mm 重量92g(電池除く)



発声ボタン  
(2ボタン)

音量 トーン  
調整ボタン

### 選ぶポイント

二つの音量  
を使い分けたい方



写真はニューボイスⅡ

あご周辺 首に痛みのある方へ



別売 口腔チューブ

本品で話すためには練習が必要です。(習熟には個人差があります)  
口と舌で言葉をつくる必要があります。  
言葉によって発声しにくい場合があります。

ニューボイスシリーズは最新の技術、素材を使用した電動喉頭です。本体ケースは軽量・高強度の素材で出来ており、重量も蓄電池を含め約125gと軽量です。本品は付属の蓄電池での作動を前提としておりますが、市販の9Vアルカリ乾電池でも作動しますので、外出先で急に蓄電池の電気容量が無くなった時でも安心してご使用になれます。

#### ■ニューボイスシリーズによる発声の練習・習得

本品の習得には練習が必要です。習得の度合いには個人差があります。

本品の使用は耳鼻咽喉科医・言語聴覚士、または日本全国に拠点を置く発声教室で指導を受けられることを前提としています。各地の発声教室の情報は特定非営利活動団体 日本喉摘者団体連合会（〒105-0004東京都港区新橋5-7-13ピュロー新橋901 TEL:03-3436-1820 FAX:03-3436-3497）にお問い合わせ願います。

#### ■ニューボイスシリーズによる発声の原理

本品が発生する音源を元に発声します。本体上部の白い部分をあご下部や首周辺に押し付け、本体スイッチを押し、人工喉頭の発声音を口腔内で共鳴させることにより話します。発声し難い言葉もあります。話す際はスイッチを押し、舌と唇で言葉を作り話します。あご下部から首上部間の肌にニューボイスシリーズの上部を押し付けて“声”が一番良く共鳴する箇所を選びます。

#### ■別売・口腔チューブ・専用チューブの利用について

喉頭全摘術を受けた直後から、またはあごの下や首周辺に痛みがある方にはニューボイスシリーズと口腔チューブ又は専用チューブの併用で本品をご使用頂けます。術後痛みが無くなり、チューブが不要になった方は本品を通常の人工喉頭としてご使用頂けます。口腔チューブは「ニューボイスシリーズ」本体のノーズキャップに被せます。専用チューブにつきましては、事前準備としてチューブをチューブアダプターに接続し、チューブアダプターを本体のノーズキャップに被せます。話す際はチューブの先端を口腔内に入れ、話すようにします。尚、チューブ利用は言葉になり難いことがあり、一時使用・補助であり、長期使用を前提としておりません。

#### ■製品保証について

- ニューボイスシリーズ本体に限り保証します。
- 保証は一般的な使用状況下に限り保証基準に準じます。
- 付属の蓄電池と充電器は保証対象外です。

#### ■修理とアフターサービス

ご利用者の皆様がいままで早くご使用頂ける様万全のアフターサービス体制をとっております。本品の動作、性能に支障が生じたと感じられましたら、お客様が本品をお買い上げた店に連絡願います。ニューボイスシリーズの不具合は修理としてお受けしますが、それ以外の付属品（蓄電池と充電器）は個別販売にて対応致します。

#### 〔ニューボイスシリーズのセット内容〕

本 体：1個

蓄 電 池：2個（006P型・9Vタイプ）

専用充電器：1個

販 売 元：センシンメディカル株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3  
フリーダイヤル：0120-731008 FAX：03-5802-0562 メールアドレス：elarynx@cap.ocn.ne.jp



取扱店