

エアトラック アバント

挿管用喉頭鏡



■エアトラック アバント

コード番号	JANコード(13)	JANコード(14)	販売名	包装単位	気管チューブ適合サイズ	包装内容
9071	4547231128746	04547231128746	エアトラック アバント セット (レギュラー)	1セット / 箱	ID 7.0~8.5(mm)	光学ユニット 1 箱、 エアトラック アバント ブレード (レギュラー) 1 箱
9072	4547231128753	04547231128753	エアトラック アバント セット (スモール)	1セット / 箱	ID 6.0~7.5(mm)	光学ユニット 1 箱、 エアトラック アバント ブレード (スモール) 1 箱
9081	4547231128760	14547231128767	エアトラック アバント ブレード (レギュラー)	10 個 / 箱	ID 7.0~8.5(mm)	—
9082	4547231128777	14547231128774	エアトラック アバント ブレード (スモール)	10 個 / 箱	ID 6.0~7.5(mm)	—
9091	4547231128784	04547231128784	エアトラック アバント ドックステーション	1 台/箱	—	—

■エアトラック スマホアダプター

コード番号	JANコード(13)	JANコード(14)	販売名	包装単位
9099	4547231128791	04547231128791	エアトラック スマホアダプター	1 個 / 箱

・参考文献

Use of the new Airtraq "Airtraq AVANT" in clinical setting.
Journal of Clinical Anesthesia. 2015 in press

販売業者



■問い合わせ先 : メディカル事業部 TEL.03-5802-0560 FAX.03-5802-0562

製造販売業者

泉工医科貿易株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島3-21-4

製造業者




PRODOL

注意 ご使用前に必ず添付文書及び取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●不許複製 ●届出番号: 13B1X00078110022

アプリ (Airtraq Mobile) 説明

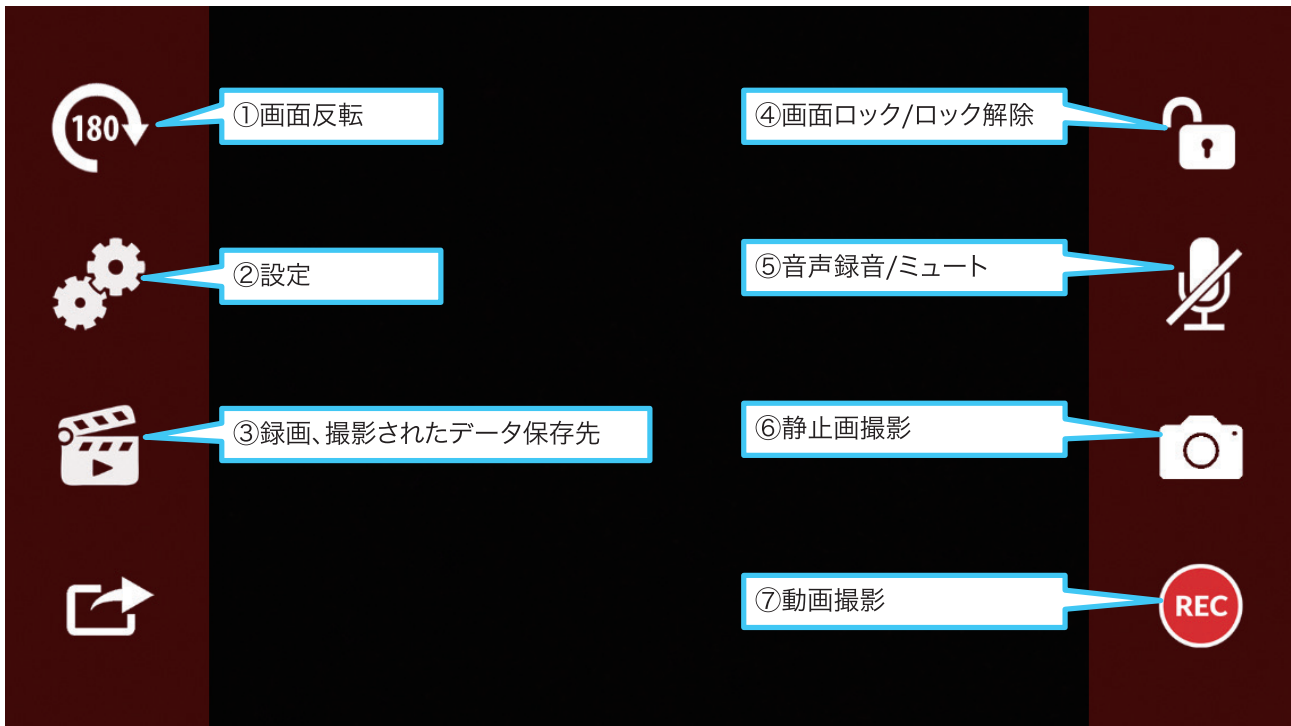

- ①画面が反転します。座位など通常挿管とは異なる方向からの挿管時に使用します。
- ②スマホアダプターへモニターデバイスを取り付ける際の位置調整補助やクイックスタートガイド、デモビデオ等が入っています。
- ③録画された動画や静止画が保存されています。
- ④画面を固定します。ロックをかけるとズームを固定します。
- ⑤動画を録画する際、使用者の説明などの声を録音するか、ミュートにするか選択できます。
- ⑥静止画撮影です。タップすると撮影されます。
- ⑦動画撮影です。タップすると撮影が始まり、もう一度タップすると、撮影が終了します。

*モニターデバイスにより映し出される画質は異なります。