

中山式改良型 吸引バッグ/A型(開胸用)B型(一般用)



A型(開胸用)

B型(一般用)

■中山式改良型吸引バッグA型(開胸用)

■特長

- E.O.G.滅菌済みなので、すぐにご使用になれます。
- サイホンの原理を応用した吸引法です。
- 衛生的でベッドに簡単に取り付けられます。
- 移動位置に便利です。

■使用法

- 0点(約300cc)まで、C部の管より滅菌蒸留水を入れる。
- A部をカテーテルコネクタ又は患者ドレーンに接続する。

■届出番号:11B1X00016000003 ■E.O.G.滅菌済み

■販売単位:1箱/20個入 ■クラス分類: I

■中山式改良型吸引バッグB型(一般用)

■特長

- E.O.G.滅菌済みなので、すぐにご使用になれます。
- サイホンの原理を応用した吸引法です。
- 衛生的でベッドに簡単に取り付けられます。
- 移動位置に便利です。

■使用法

- 0点(約50cc)まで、C部の管より滅菌蒸留水を入れる。
- A部をカテーテルコネクタ又は患者ドレーンに接続する。
- A部の一端を曲折しB部の太いビニール管の弾力部を図のように折り曲げ、元に戻る復元力で吸引することで、サイホンの原理により簡単、迅速、強力に吸引できる。

■届出番号:11B1X00016000003 ■E.O.G.滅菌済み

■販売単位:1箱/20個入 ■クラス分類: I

品番	価格
4600	¥12,000/1箱

品番	価格
4601	¥12,000/1箱

コード番号	種類	バッグ容量	接続口
0158000101	A型(開胸用)	800mL	A 内径8mm

コード番号	種類	バッグ容量	接続口
0158000201	B型(一般用)	700mL	A 内径6mm

センシンメディカル株式会社

SENSHIN

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16ブリテック・ビル6F TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562 URL: <http://www.senshin-medical.co.jp/>

製造元

MEIRA 泉工医科工業株式会社

〒344-0054 埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先: TEL03-3812-3254 FAX03-3815-7011

※改良の為、写真とは若干異なる場合がございます。予めご確認下さい。