

SAMARIT

improving patient care



“『NO』リフト”
移乗システム

サマリット
ロールボード

For
HEAVY
use!

ロールボードは移乗の負担を減らし、安全で容易にできる様デザインされています
ロールボードを利用することにより、利用者を持ち上げることなく移乗をスムーズに行えます

幅の広い移乗に

スタンダード

手術室、検査室、ICU、病棟等

50
←→



■様々な場面で使用できるスタンダードタイプ

178X50cm(折畳89x50cm) 2.7kg

コード番号	JANコード	型式	希望小売価格
8500	4562127615001	R-0100	¥188,000

ミニ

手術室、泌尿器科、婦人科、救急 等

50
←→



■スタンダード (R-0100)のミニサイズ1枚があると便利

91x50cm 1.4kg


コード番号	JANコード	型式	希望小売価格
8502	4562127615025	R-0300	¥125,000

ロールボードは 利用者の移乗をやさしくします

ロールボードの基本原理：

ロールボードは特殊フレームと特殊シートで構成されています。利用者がロールボードに乗ることによってフレーム上のシートが回転し、最小限の力で利用者がスムーズに移乗することができます。

毎日の移乗の中にはベッドからストレッチャー、ストレッチャーから手術台、ストレッチャーから検査室等様々な場所での移乗があります。それぞれの場所で快適で安全な移乗を行うことができるのがロールボードです。

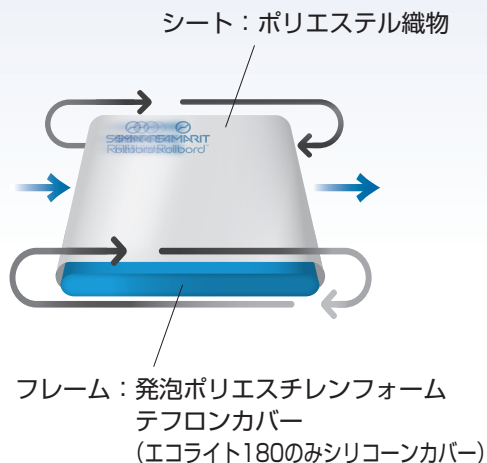

ロールボードシリーズ

Rollbord™

幅の狭い移乗に

サージボード

手術室、検査室、ICU、病棟等

40
↔



■全長が短く狭い場所でも使い易い

120x40cm 1.5kg

コード番号 JANコード 型式 希望小売価格
8503 4562127615032 R-0400 ￥145,000

MRI-CT

手術室、検査室、ICU、病棟等

40
↔



■スタンダード(R-0100)の幅狭タイプ

178x40cm (折畳89x40) 2.5kg

コード番号 JANコード 型式 希望小売価格
8504 4562127615049 R-0500 ￥192,000

浴室対応

エコライト180

機械浴槽ストレッチャー、病棟 等

50
↔



■フレームからシートが外せて使用後に乾燥可能

180x50cm (折畳89x50) 2.8kg

コード番号 JANコード 型式 希望小売価格
8505 4562127615056 R-1180 ￥138,000

特徴

- ・利用者とシートの上に摩擦が生じない為スムーズで安心した移乗が可能
- ・軽量 (1.4kg~3.8kg)で持ち運び易い
- ・場面に合わせたサイズバリエーション
- ・シート表面を抗菌処理し、拭き易く、衛生的
- ・MR室への持込みが可能 (非磁性体素材使用)
- ・汚れを防ぐボードカバー (別売り)

収納・保管に

ロールボードスタンド

コード番号 希望小売価格
8507 ￥135,000



■ステンレス製スタンド

W:630xD:500xH:970mm

キャスター:75φストッパー付き

使用例

Rollbord™



1. 利用者を浅い側臥位にして、身体の下にボードを15~20cm差し込み、利用者を元の仰臥位に戻します。



2. 利用者の両腕を胸の上、頭部と両脚をボードの上に乗せ肩部、大腿部をやさしく・ゆっくり、ボードの上を滑らすように押します。



3. 利用者を浅い側臥位にして、背面からボードをゆっくりと抜き取り、仰臥位に戻し移乗完了。

Webサイトにて使用動画をご覧頂けます <https://www.youtube.com/watch?v=u1deowfZtcM>



オプション品

ボードカバーディスポーザブル

コード番号 型式 希望小売価格
8506 R-1600 ￥26,000



サイズ：W:60cmx100m(筒状)

- ロールボードへの血液・分泌物等からの汚れを防止
全てのロールボードに使用可能
約1.9m間隔でミシン目が入れているので、切り取ってご使用いただけます

⚠ 使用上の注意点

ご使用の際はベッド・ストレッチャー等のキャスターのロックをご確認下さい。

安全な移乗を行う為移乗側に人を配置し、2人以上でご使用下さい(上記写真、web動画は使用例の為1人で行っています)。

※MR室への持込み・ご使用は可能ですが、利用者を乗せたままでの撮影(CT、X線も含む)には対応しておりません(部品の写り込みの恐れ)。また、シートが回転し利用者の転落・怪我の恐れがあります。

詳しい使用方法是別紙「ロールボード使用方法」をご覧ください。

高品位規格

- ・ CEマーク取得
- ・ 国際特許取得

クリーニング

ロールボードは一般の消毒剤(塩素系以外)を使用してクリーニングすることができます。

ロールボードが汚れる状況で使用する際は、ボードカバーディスポーザブル(R-1600 別売)をご使用ください。ボードカバーディスポーザブルを使用することにより、ロールボード本体を完全に覆うことができ、使用後は、手を汚すことなく処理ができます。



座位 移乗ボード
グライドボード

販売元:

センシンメディカル株式会社
SENSHIN

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階
TEL:03-5802-0560 FAX:03-5802-0562
URL: <https://www.senshin-medical.co.jp>

製造元: **SAMARIT**
improving patient care
サマリット社 (スイス)

お問い合わせ

品質向上の為、仕様を予告なく変更する場合がございます