

信頼される安心を、社会へ。

SECOM

「もう一度、声が欲しい」
その気持ちにセコムがお応えしました。

マイボイス



独自の電動式人工喉頭 セコム「マイボイス」

「マイボイス」の特長



抑揚付き発声とフラットな発声の使い分けが可能

マイボイスは、2つのボタンの使い分けによって抑揚のついた発声とフラットな発声を使い分けることができます。はじめはフラットな発声で基本的な技術を習得し、上達してきたら、抑揚がついた自然なイントネーションでの会話やスピーチを楽しむといった使い方ができます。



《高音タイプもあります》

マイボイスは、中高年男性の声に近い80～100Hzの音を出すように設計されていますがお好みに応じて160～200Hzの高い音を出せるタイプもご用意していますので、女性や若年者の方も自然な発声ができます。

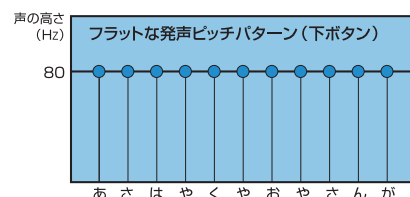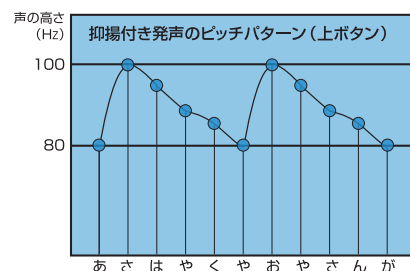

外出時でも安心な省電力設計

発声ボタンとは別に電源ボタンがある設計ではないため、発声ボタンを押しながら使用している間だけ電力を消費します。このため unnecessary 電力消費量が少なく、電源ボタンの切り忘れを気にする必要もありません。また、付属の充電式電池だけでなく市販のアルカリ角型電池も使用できるので、不意の電池切れの際も安心です。

助成制度

電動式人工喉頭は自治体からの交付（助成金）を受けられる制度があります。詳しくは、各自治体の福祉窓口へご相談ください。

握りやすい設計です

電動式人工喉頭は長時間使う場合もあるので握りやすさも重要です。マイボイスは、胸の下部の薬指と小指が当たる部分がやや扁平になるように設計していますので、握りやすくなっています。

故障時の対応も安心

本体の保証期間は商品発送日より3年間。
付属品の保証内容は付属品ごとの保証書と取扱説明書をご確認ください。

製品名	マイボイス
寸 法	直径 (最大) 34mm、長さ 135mm
質 量	110g (電池を除く)
連続使用可能時間	付属の充電電池: 約1時間 ※アルカリ乾電池9V型 (6P型) も使用可能。
付属品	充電器: 1個、充電電池: 2個、ソフトケース: 1個
ボタンの使い分け	抑揚付き発声 (上ボタン)、フラット発声 (下ボタン) を使い分けます。

※本機は、磁気の強い製品です。ペースメーカーなどの磁気の影響を受けやすい機器・製品とは十分な距離において使用・携行してください

信頼される安心を、社会へ。

SECOM

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1
www.secom.co.jp

販売元: センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2-7-16 プリ・テックビル6階
フリーダイヤル: 0120-731008 / FAX: 03-5802-0562
メールアドレス: ss_reception@senshin-medical.co.jp
<https://www.senshin-medical.co.jp>

販売店

ニューボイス

Made in USA ニューボイス社製



電動式人工喉頭・発声補助具

喉頭全摘出術を受けた方
気管切開術を受けた方
何らかの理由で発声が困難な方

ニューボイス II

簡単操作 2タイプ

お好みに合わせて
お選びください。
発声音はどちらも
同じです。



音量調整ボタンを押しながら発声ボタンを押すと音量が徐々に上がります。お好きな音量で手を離せばセット完了。バッグやポケットに入れてもずれにくい設計です。

商品コード	A302000
サイズ	直径34mm 長さ112mm 重量87g(電池除く)
トーン調整	トーン調整ボタンを先の細い物でやさしく押しながら発声ボタンを押して調整

ニューボイス I



音量調整はダイヤル式。使用するシーンに合わせて簡単に音量を調整できます。

商品コード	A302001
サイズ	直径34mm 長さ107mm 重量90g(電池除く)
トーン調整	発声ボタンを押しながらトーン調整ダイヤルに付属のドライバーを差し込んで調整

ニューボイスの特長

- ・ 軽量、コンパクト
- ・ 本体は耐久性のあるポリカーボネート製
- ・ パワフル音量
- ・ 充電式電池、予備付

多機能



ニューボイス III

2つの発声ボタンがあり、それぞれのボタンに音量をセットできます。シーンによって使い分けできます。

商品コード	A302003
サイズ	直径34mm 長さ120mm 重量92g(電池除く)
トーン調整	それぞれの発声ボタンと音量・トーン調整ボタンで調整

01 発声方法



- ① ノーズキャップ(本体上部の白い部分)をあご下部や首周辺に、皮膚に対して直角に軽く押しつけます。
- ② 口で大きく「あ」の形を作って発声ボタンを押します。
- ③ よく響く明瞭な「あ」の音が出れば、その場所を覚えておいてください。
- ④ 明瞭な音が出なければ、押しつける場所を少しずつずらしながら、一番よく聞こえる場所を探してください。
- ⑤ 鏡を見ながら行うことをおすすめします。
- ⑥ どの場所が最もよく聞こえるかは個人差があります。

02 発声の練習・習得

本品の習得には練習が必要です。習得の度合いには個人差があります。

本品の使用は耳鼻咽喉科医・言語聴覚士、または日本全国に拠点を置く発声教室で指導を受けられることを前提としています。各地の発声教室の情報は「特定非営利活動法人 日本喉摘者団体連合会」(〒105-0004東京都港区新橋5-7-13ビュロー新橋901 TEL:03-3436-1820 FAX:03-3436-3497)にお問合せください。

03 試用機の貸出し

ご購入を検討されている方へ試用機の貸出しを行っております。

貸出し期間は2週間で費用は無料です。(返却送料のみご負担ください。)

メールまたはFAXでお申込みください。

04 アフターサービス

ご購入から7年間修理対応いたします。

※5年以内は無償修理(一般的な使用状況下での故障に限ります。)

※5年超～7年は有償修理

※付属の充電電池と充電器は保証対象外
修理期間中は代替機を貸出します。

05 日常生活用具給付対象

電動式人工喉頭「ニューボイス」は、日常生活用具給付対象商品です。

給付を受けられる条件、手続き方法、給付額等は地方自治体によって異なりますので、詳しくは、お住まいの市区町村役場の福祉窓口へお問合せください。

06 セットの内容

本 体：1台

専用充電器：1個

充 電 池：2個(6P型)

※市販のアルカリ電池(絶縁リングのないタイプ)でも使用できます。

(ホームページ)



販売店

お問合せ

TEL 0120-731008 (フリーダイヤル)

FAX 03-5802-0562

MAIL ss_reception@senshin-medical.co.jp

販売元



センシンメディカル株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目7番16号
プリ・テックビル6階