

血沈測定システム

システム

- WESTERGEREN (ウェスターグレン) 法に準じた測定システムです
- 血沈棒にはストッパーがついておりますので安易に0点に合わせることができます
- ディスプレイ商品ですので安全にご使用できます

ディスプレイ血沈棒

一般医療機器 (クラスI)
 品番: 1030
 品名: ポリスベットG-S
 JANコード: 4582251011289
 医療機器製造販売届出番号: 20B3X00010000041
1箱 (100本入り)
価格 (税抜) ¥5,600-




0地点ストッパー付き



先端テーパ付き

専用スタンド

品番: 1013
 品名: 血沈DLスタンド
 JANコード: 4562127610013
1台
価格 (税抜) ¥15,700-

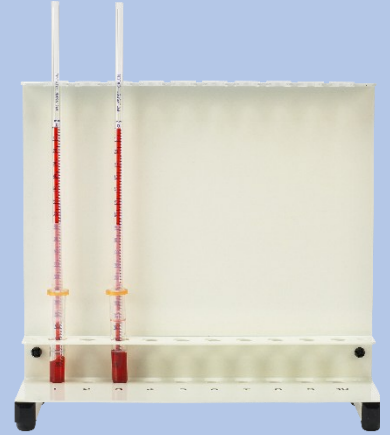

ポリスベットG-Sを10本立てられます

品番: 1016
 品名: スタンド用ダブルストッパー
 JANコード: 456127610105
1袋 (10個入り)
価格 (税抜) ¥850



品番: 1031
 品名: E-Sチューブ
 JANコード: 4562127610136
1箱 (500本入り)
価格 (税抜) ¥10,000



品番: 1032
 品名: CT-Sチューブ
 JANコード: 4562127610143
1箱 (500本入り)
価格 (税抜) ¥17,800




血沈専用真空採血管用




品番: 1015
 品名: 吸引用バネアダプター
 JANコード: 4562127610099
1セット (5本入り)
価格 (税抜) ¥2,500



陰圧により片手で血液を移動できます

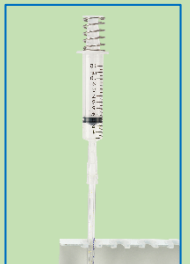

◆E-Sチューブの使い方

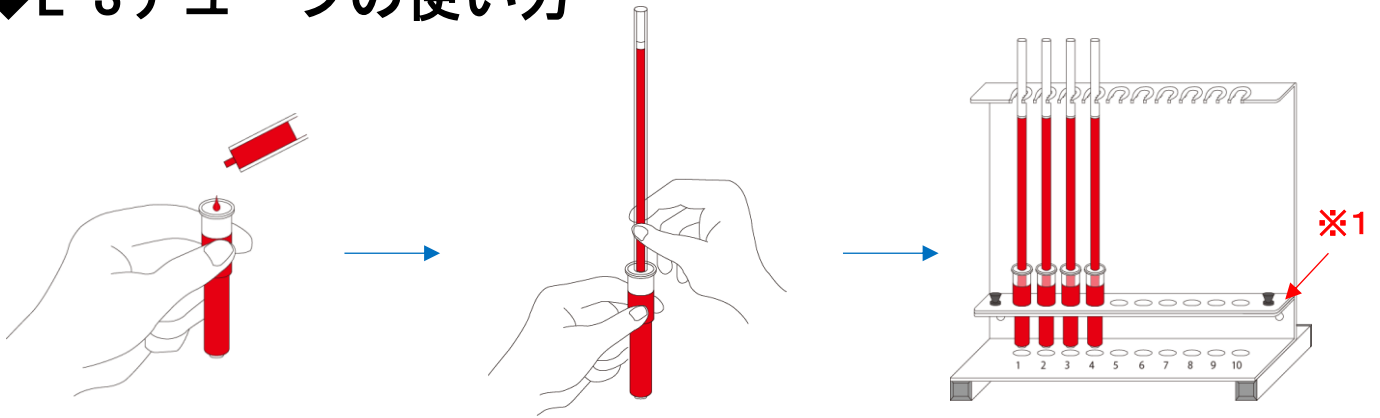


①注射針を取り、血液をE-Sチューブに移し目安線（上部より約4mm）まで入れます。
注意：E-Sチューブには血液抗凝固剤は入っておりません。

②ポリスペットG-SをE-Sチューブにゆっくり差し込み、0点ストッパーに血液が付着するまでゆっくり押し込んでください。

③そのままアタッチメント（※1）を前に置いたDLスタンドに立てポリスペットG-Sの上部をダブルストッパーに固定します。
 これでセット完了です。

◆CT-Sチューブの使い方

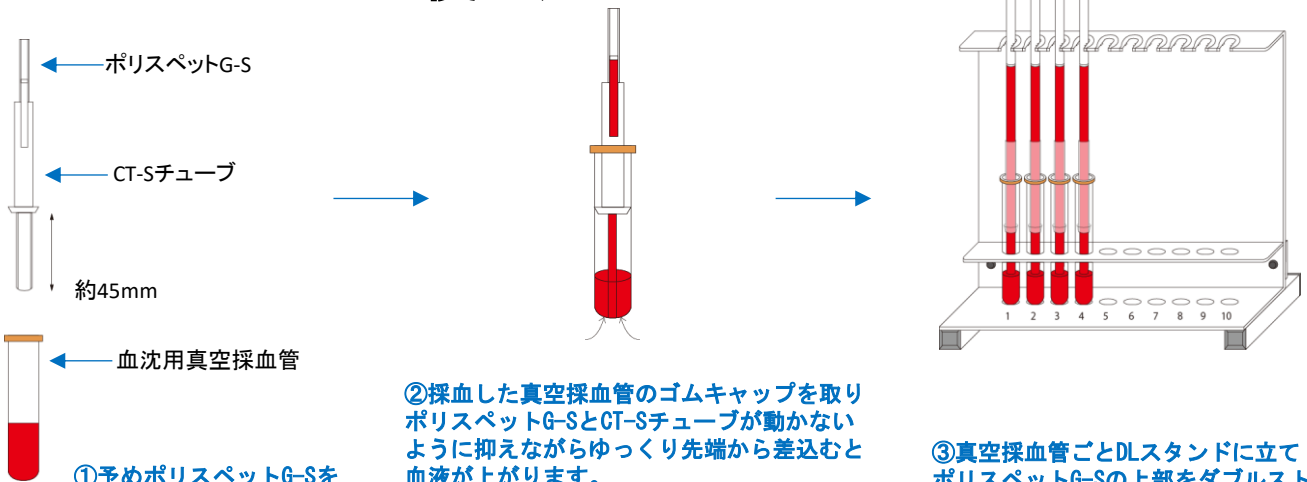


①予めポリスペットG-SをCT-Sチューブに差し込み先端を約45mm出しておきます。

②採血した真空採血管のゴムキャップを取りポリスペットG-SとCT-Sチューブが動かないように抑えながらゆっくり先端から差し込むと血液が上がります。
 0点ストッパーに血液が付着するまでゆっくり押し込んでください。

③真空採血管ごとDLスタンドに立てポリスペットG-Sの上部をダブルストッパーに固定して準備完了です。
 （アタッチメントの移動は不要です）

◆バネアダプターの使い方

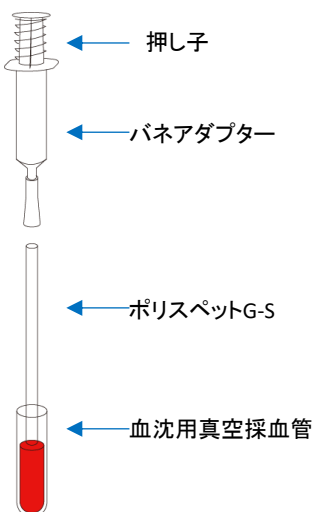

①血液が入った真空採血管にポリスペットG-Sを差し込みDLスタンドに立てます。

②バネアダプター押し子を押しながらバネアダプター先端を強めにポリスペットG-S上部にセットし押し子をゆっくり離してください。（その時ポリスペットG-Sを若干真空採血管から離すとスムーズに血液が移動します）ポリスペットG-S 0点ストッパーに血液が付着しましたら準備完了です。

**三種類の血液移管方法をご提案致します。
 簡単、スピーディーに
 検査が安易に行えます。**

